

# 登革病毒 IgG、IgM 抗体联合检测试剂盒

(胶体金免疫层析法)

## 产品介绍

本试剂盒用于定性的检测人群血清、血浆或全血中登革病毒的IgM、IgG抗体，用于临床实验室对具有持续发烧的登革热症状的病人的辅助诊断。

## 产品特点

### 操作简便

无需任何仪器设备；

### 方式灵活

样本可为全血、血清或血浆；



## 主要组分


序号	组成名称
1	测试卡
2	采血针
3	样本稀释液
4	吸管

### 检测快速

15分钟即可出检测结果；


### 值得信赖

敏感性和特异性均>90%。

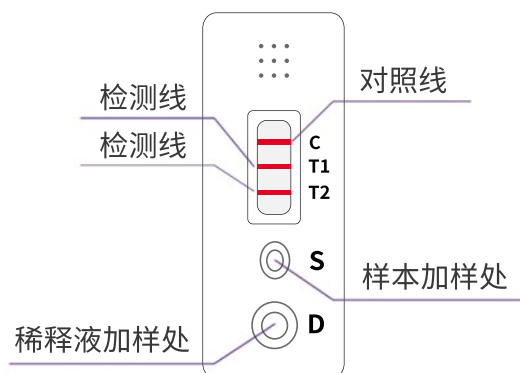


PS: 铝箔袋开封后，测试卡应在1小时内尽快使用。


## 产品使用流程

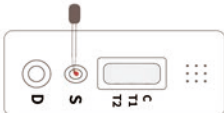

a.使用吸管吸取全血/血清/血浆样本，垂直加入10ul(约1滴)于样本加样孔(S)中；




b.然后往稀释液加样孔(D)滴加2滴稀释液；




c.15~20分钟观察显示结果，30分钟后显示结果无临床意义。


## 结果判定

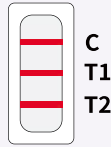


IgG&IgM阳性

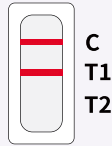


IgG阳性

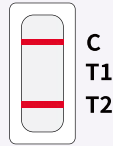

IgM阳性

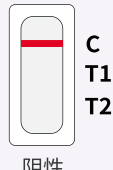

阴性



无效