



快速检测



高灵敏度



性能稳定

## 幽门螺杆菌 (HP) 抗原检测试剂盒 (胶体金法)

Helicobacter Pylori (HP) Antigen Detection Kit (Colloidal Gold Method)

### 产品介绍 Product Introduction

用于体外定性检测人粪便样本中的幽门螺杆菌抗原。

### 产品流程 Product Operation



准备

沿铝箔袋切口部位撕开取出试卡平放,并做好标记。



采集样本

采用干净容器收集人粪便样本(应在2小时内进行检测)。



滴加试液

拧开样本收集管透明盖子,取预处理样本的溶液2-3滴(约60ul)滴入加样孔中(试卡)。



观察结果

观察结果,15分钟观察测试结果,超过30分钟后还未反应则结果无效。

### 产品特点 Product Features

1.快速简便,15分钟出结果


3.无创无痛,无需打针吃药




2.准确可靠,高灵敏度

4.性能稳定,常温存储,利于运输


### 判定结果 Judgment Result

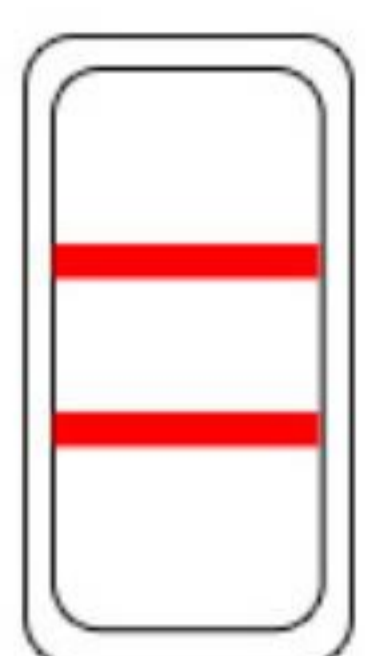

阳性

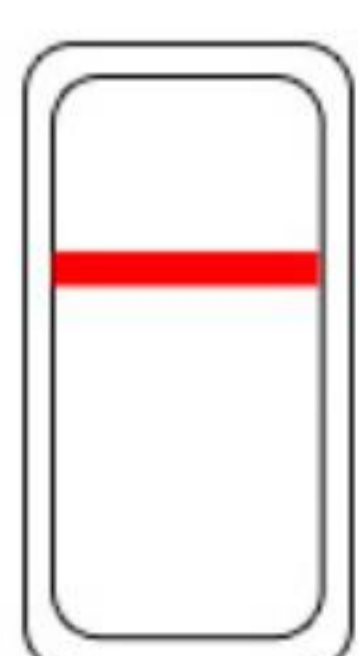

阴性

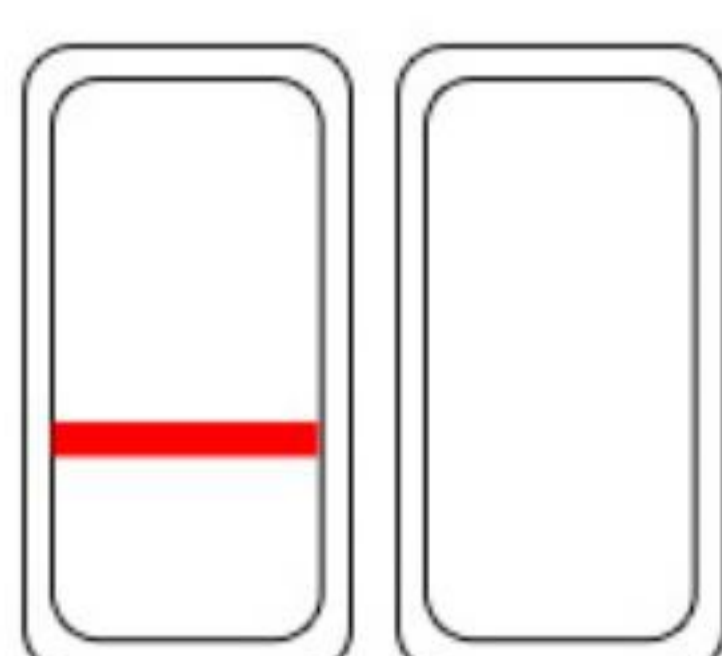

无效

**阳性:** 即在检测线(T)及对照线(C)各出现一条红色反应线。

**阴性:** 一条红色反应线,即在对照线(C)出现一条红色反应线。

**无效:** 在对照线(C)没有出现红色反应线,检测无效,需要用新测试卡重新测试。

